

Modèle du produit

OD-100




Champ d'application

L'appareil de désinfection Micomme OD-100 génère de l'ozone et l'applique en tant que désinfectant.

Schéma

Schéma de structure de l'appareil de désinfection.

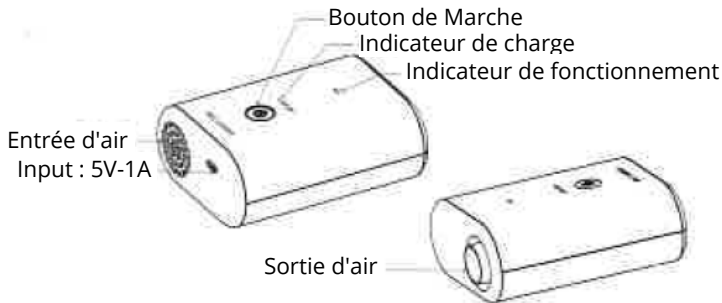

Composition du produit

Ce produit est composé d'un générateur d'ozone (dont un pack de haute pression et d'un générateur de céramique), un ventilateur DC, un panneau de commande principal, des batteries lithium et une alimentation).

Le panneau de commande principal contrôle le générateur d'ozone pour générer l'ozone. Le ventilateur DC souffle l'ozone dans l'équipement pour désinfecter son circuit intérieur.

Performance du produit

- Concentration d'Ozone : >60mg/m³;
- Temps de désinfection : 35 minutes
- Effet de désinfection : Moyen à bas niveau de désinfection

Paramètres physiques et électriques

Tableau 1 Paramètres physiques et électriques	
Dimensions	Longueur x Largeur x Hauteur = 120 mm x 90 mm x 45 mm
Poids	200g
Input	5.0 V 1000 mA (maximum), Puissance : 4 W
Source d'alimentation	Batteries lithium rechargeables, 3.7 V, 2000 mAh
Indice d'étanchéité	IPX0

Paramètres environnementaux

Tableau 2 Paramètres environnementaux		
	En état de marche	Condition de conservation
Température	- 5°C à 45°C	- 20°C à 55°C
Humidité relative	15% à 85% (sans condensation)	15% à 85% (sans condensation)
Pression atmosphérique	83 à 102kPA (1707 m au-dessus du niveau de mer)	/

Instruction d'emploi

- Avant d'utiliser l'appareil de désinfection, débranchez votre CPAP/PPC à désinfecter et videz l'humidificateur le cas échéant.
- Pour allumer : appuyez longuement sur le bouton de marche, l'appareil émettra un son de vibration courts, l'indicateur de fonctionnement s'allume en vert signalant le début du processus de désinfection.
- Pour éteindre : à l'achèvement de la désinfection, l'appareil émettra 5 sons de vibrations courts, l'appareil de désinfection s'éteint automatiquement tout comme l'indicateur vert.

- Si vous souhaitez arrêter la désinfection en cours, appuyez longuement sur le bouton de marche. L'appareil émettra un long son de vibration dès qu'il s'éteint tout comme l'indicateur de fonctionnement.
- L'usage recommandé est montré ci-bas :



Instruction pour charger

- Chargement : chargez l'appareil quand il est éteint. L'indicateur de charge devient rouge et se met en vert lorsque l'appareil est complètement chargé. Cet appareil de désinfection peut être complètement chargé en 2h30.
- Signaux de batterie faible : si le OD-100 est trop faible pour fonctionner, l'indicateur de fonctionnement devient rouge et l'appareil émettra un son de vibration. Il est recommandé de charger l'appareil aussitôt. Sans chargement complet, le OD-100 peut échouer à délivrer une désinfection totale.
- Des batteries lithium rechargeables sont incorporées dans ce produit. Voici le schéma pour le chargement.






Avertissements

- Ne pas charger lorsque l'appareil est en marche
- Positionner l'appareil de désinfection et les produits à désinfecter dans un espace fermé pendant le processus de désinfection égal ou inférieur à 3L. Un espace dépassant les 3L peut réduire l'efficacité de la désinfection.
- La CPAP désinfectée peut être utilisée 2 heures suite à la désinfection afin d'assurer la dissolution complète de l'ozone.
- L'appareil chargé à 100% peut effectuer 3 tours de désinfection.
- Les batteries lithium intégrées peuvent être transportées en avion, en soute ou en cabine.
- Ne pas démonter l'appareil seul. En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur ou le SAV. Tout endommagement causé par un démontage auto-administré n'est pas couvert par la garantie.
- Pour mieux charger les batteries lithium, suivez les Paramètres physiques et électriques dans le Tableau 1.
- Le temps de désinfection est de 35 minutes environ. Une fois ce temps écoulé la désinfection est effective et l'appareil s'éteint automatiquement. Une extension du temps de désinfection n'est pas nécessaire.
- La performance des batteries rechargeables baisse avec l'augmentation de l'usage. C'est un phénomène normal.
- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil de désinfection avec de l'eau chaude ou un linge doux imprégné d'une solution détergente neutre. Avant de charger, assurez-vous que l'entrée d'alimentation de l'appareil est sèche.
- Il est recommandé de désinfecter la CPAP/PPC, tuyau et masque de façon hebdomadaire.
- L'inhalation directe de l'ozone peut fortement stimuler les voies respiratoires et provoquer des maux de gorge, des toux dus à une oppression thoracique etc.
- Ne vous approchez pas de l'appareil OD-100 dès la fin de la désinfection. Attendez 20 à 30 minutes pour aérer la pièce.
- Assurez-vous que la pièce où s'effectue la désinfection est ventilée.

Tableau de dépannage

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Connectez le chargeur comme indiqué
L'indicateur de charge ne fonctionne pas	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation
L'appareil ne fonctionne pas après qu'il ait fini de se recharger	Contactez le SAV ou l'agent de maintenance
L'ozone n'est pas généré	Contactez le SAV ou l'agent de maintenance

Interprétation de l'étiquetage sur le produit

Symbole	Signification	Symbole	Solution
	Parties non maintenables par l'utilisateur		Le recyclage et la récupération de ce produit est soumis aux dispositions pertinentes de WEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des Equipements Electriques et Electroniques) et les directives de RohS (Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses).
	Attention		

