
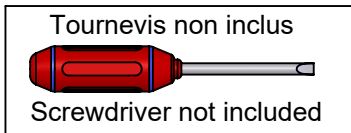


MONTAGE RÉTENTIF SANGLE (PN184053)

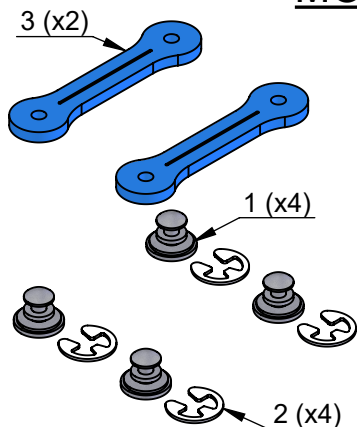


FR: ÉTAPE 1

Mettre les Pions (1) sur couvercle avec un alignement de deux trous à l'horizontal et 1 trou à la vertical

UK: STEP 1

Place the pins (1) on the cover aligning two holes horizontally and one hole vertically


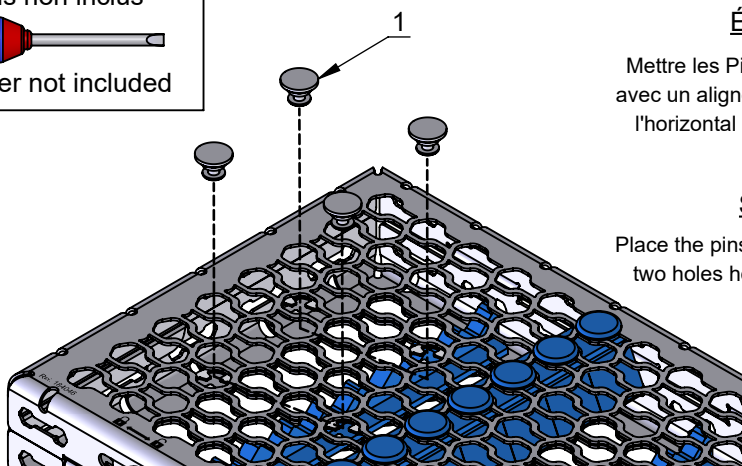


FR: ÉTAPE 2

Mettre les circlips (2) par l'intérieur à l'aide d'un tournevis plat dans la gorge du pion (1)

UK: STEP 2

Insert the circlips (2) from the inside using a flat-bladed screwdriver into the locking groove of the pin (1)

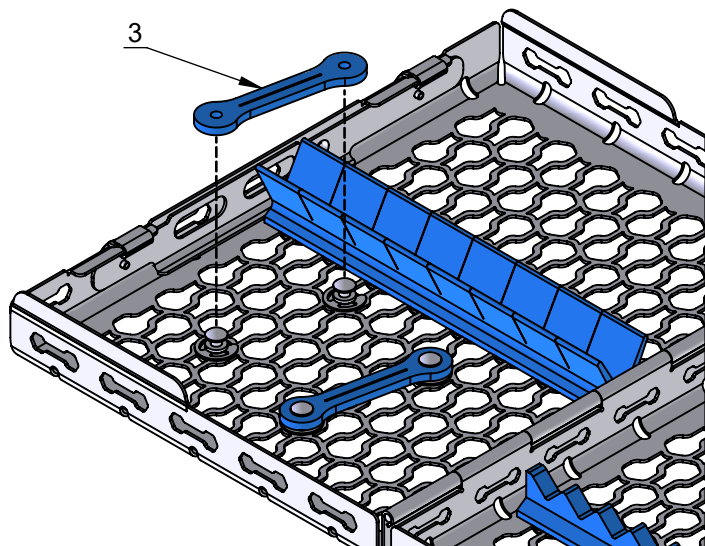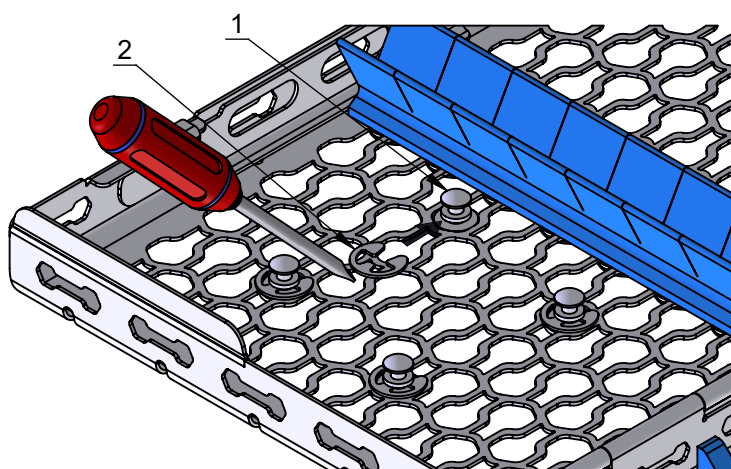


FR: ÉTAPE 3

Mettre les sangles (3) en place sur les pions (1)

UK: STEP 3

Fit the straps (3) onto the pins (1)

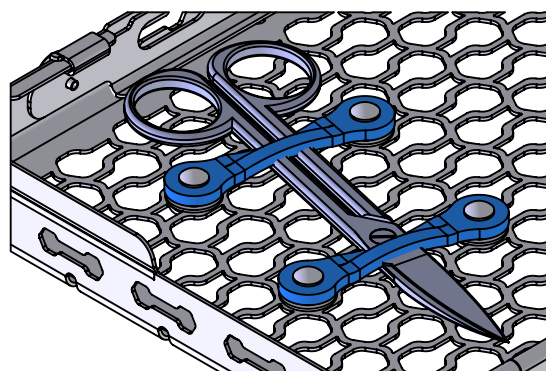

FR:

Pour un meilleur maintien, passez l'instrument dans la fente

UK:

For better support, pass the instrument through the slot.

