



# Poignée de baignoire Deluxe

Réf. AA1921

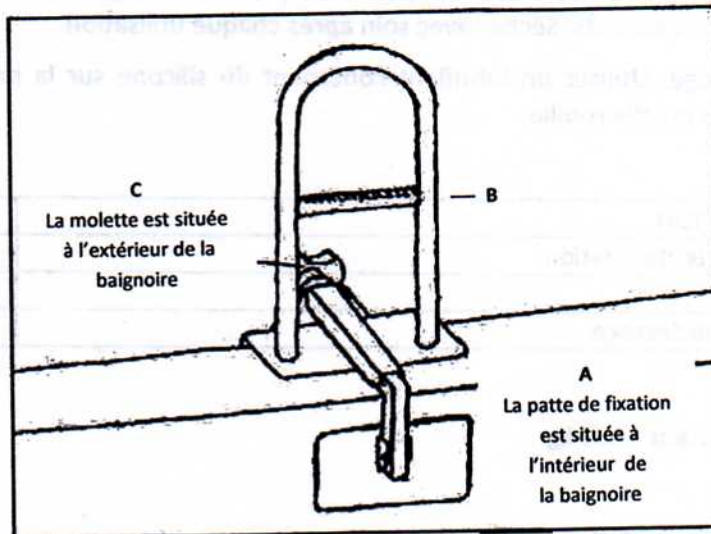

## MONTAGE/ FIXATION

1. Nettoyer avec soin le bord de la baignoire (D) où la poignée va être fixée.
2. Dévisser la molette et la rondelle de serrage (C) de la petite patte de fixation (A).
3. Glisser la petite patte de fixation (A) dans le châssis de la poignée (B) afin que la zone rembourrée de la petite patte de fixation (A) soit orientée vers le bas.
4. Introduire et visser la molette de serrage (C) dans le trou prévu à cet effet sur le châssis de la poignée (B) jusqu'à assembler la patte de fixation (A) avec le châssis.
5. Installer la poignée de bain sur le bord de la baignoire (D) de façon à ce que la molette de serrage (C) soit située à l'extérieur de la baignoire.
6. Serrer la molette (C) afin de fixer solidement la poignée à la baignoire.

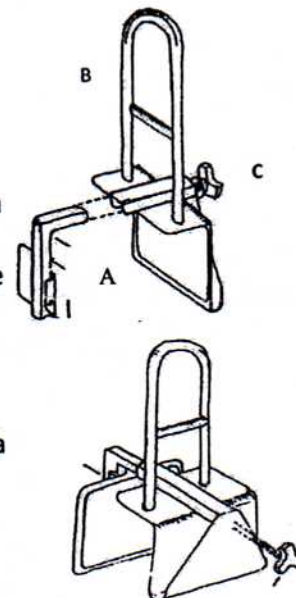

**!** Avant utilisation, essayer la poignée de baignoire pour vérifier qu'elle est bien fixée.

## UTILISATION

Ce produit est un point d'appui aidant l'utilisateur à entrer et sortir de la baignoire. Ce produit n'est PAS conçu pour supporter le poids total de la personne.

Au moment d'entrer ou de sortir de la baignoire, tenir fermement la poignée et exercer une pression vers le bas sur la partie supérieure de la poignée.

**!** NE PAS tirer ou pousser la poignée de bain latéralement, sans quoi la poignée de baignoire se desserrera et pourra causer des blessures.

**!** NE PAS utiliser la poignée sur des baignoires à rebord.

**!** Ne pas serrer excessivement la vis horizontale, ceci pourrait endommager la poignée et/ou la baignoire.