


# Poignée d'appui pour baignoire

AA1920

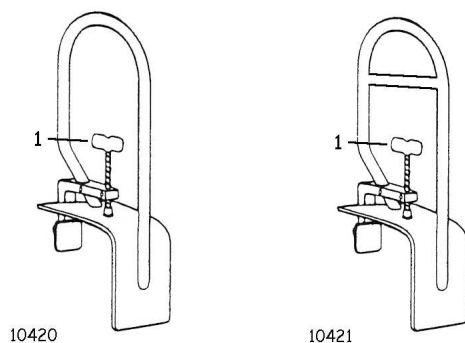

10420

10421

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / DE MONTAGE

1. Nettoyer l'endroit de la baignoire où la poignée d'appui va être fixée.
2. Dévisser le bouton de resserrage (1) pour adapter la largeur de la mâchoire de serrage à la largeur du rebord de la baignoire.
3. Le bouton de resserrage doit être positionné vers l'extérieur de la baignoire.
4. Serrer le bouton (1) de manière à ce que la poignée soit fermement attachée au rebord de la baignoire.



Avant l'utilisation, essayer le tube pour s'assurer que celui-ci est attaché de manière sécurisée au rebord de la baignoire.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce produit doit être utilisé en tant qu'aide à l'équilibre et aide pour entrer et sortir de la baignoire. Il n'est PAS conçu pour supporter le poids total du patient. Lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire, tenez la barre d'appui fermement et appuyez vous sur la barre d'appui.

## MAINTENANCE / INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyer avec un détergeant ménager et de l'eau ou avec une solution antibactérienne. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tissu abrasif. Sécher après chaque utilisation. Vérifier périodiquement le serrage de la mâchoire. Utiliser un lubrifiant à base de silicone sur la vis du bouton de resserrage pour prévenir la rouille.



NE PAS tirer ou pousser la barre d'appui dans des mouvements latéraux, car cela desserrerait la barre d'appui de la baignoire et pourrait causer des blessures.

NE PAS utiliser la barre d'appui avec des baignoires brillantes.

Ne pas trop serrer les boulons horizontaux. Cela peut causer des dommages sur la barre et/ou la barre d'appui.



Poids maximum de l'utilisateur : 100kg

Fabriqué pour :

Valentine International Ltd., Taiwan R.O.C.

Représentant européen autorisé :

Medical Specialties Limited, BB12QQ, England 100

Made in Taiwan

Rev. 031306



homecraft  
Rolyan  
A Patterson Company

DISTRIBUTED BY  
Homecraft Rolyan Ltd., A Patterson Medical  
Company,  
Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton in Ashfield,  
Nottinghamshire NG17 2HU United Kingdom