



ENVIRONNEMENT



**DENTASEPT®**

**Spray 29**

#### INDICATIONS

Dentasept® Spray 29 est une solution prête à l'emploi pour la désinfection des dispositifs médicaux, par pulvérisation. Utiliser Dentasept® Spray 29 après chaque patient évite le risque d'infection croisée.

#### AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Séchage rapide, ne laisse pas de trace
- ✓ Temps de contact : 5 à 15 minutes (selon l'efficacité recherchée)
- ✓ Large spectre d'activité antimicrobienne
- ✓ Sans parfum
- ✓ Sans aldéhyde
- ✓ Dispositif médical de classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée)

#### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 1276 – 5 minutes.  
SARM : EN 13727 – 5 minutes.  
Mycobacterium tuberculosis (BK) – 5 minutes.  
Fongicide : EN 1275, T 72-301 (Aspergillus niger et Aspergillus fumigatus) – 15 minutes.  
Actif sur : HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), HBV, Herpès virus et Influenza virus H1N1 – 5 minutes.  
Rotavirus – 15 minutes.

#### COMPOSITION QUALITATIVE

Chlorure de didécylidiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, éthanol, acide glycolique.

#### CONDITIONNEMENT

Flacon pulvérisateur d'1 litre.  
Bidon de 5 litres.



ENVIRONNEMENT

# DENTASEPT® Spray 29

## PROTOCOLE D'UTILISATION


Dentasept® Spray 29 est une solution prête à l'emploi pour la désinfection des dispositifs médicaux, par pulvérisation. Utiliser Dentasept® Spray 29 après chaque patient évite le risque d'infection croisée.

### AVANT UTILISATION

Utiliser des gants appropriés.

### COMMENT L'UTILISER

- 1 S'assurer que la zone à traiter a été nettoyée.
- 2 Pulvériser la solution sur toute la zone et s'assurer qu'elle est totalement recouverte afin d'obtenir un film antimicrobien.
- 3 Laisser Dentasept® Spray 29 agir, ne pas essuyer ni rincer.
- 4 Le séchage est rapide et ne laisse pas de trace.

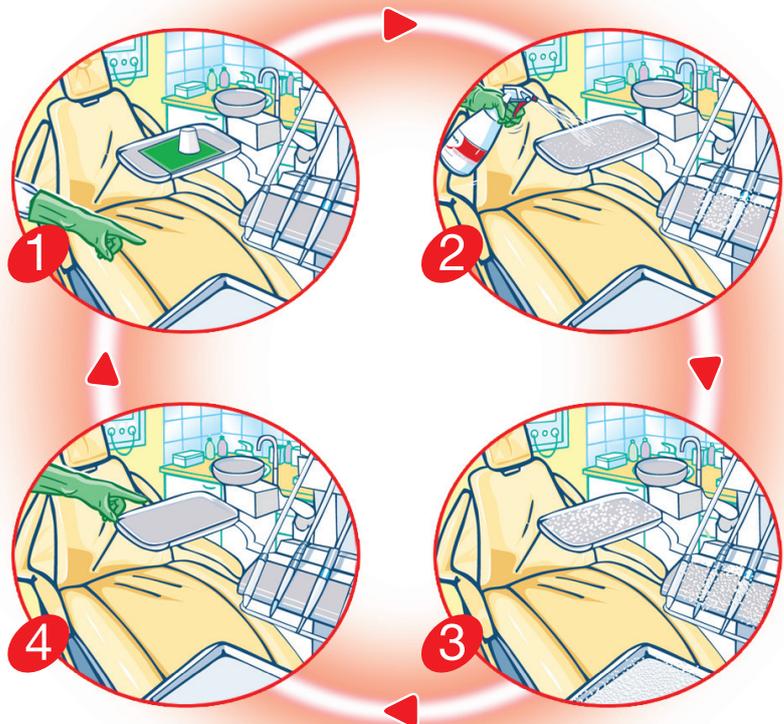

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier avant application la compatibilité des surfaces traitées avec l'alcool.

Toujours lire la Fiche de Données de Sécurité pour les précautions d'utilisation relatives au produit. Selon la Directive Européenne 99/45/EEC et ses adaptations, Dentasept® Spray 29 est classé comme une préparation dangereuse.

Conserver entre +5°C et +25°C.

■ D.M.D. Groupe Anios - Pavé du Moulin - FR-59260 Lille Hellemmes.