




neodisher® Septo PreClean ZP

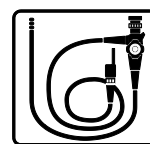

Détergent désinfectant liquide pour les instruments thermostables et thermolabile

Concentré liquide—

Domaine d'application:

- Pour la pré-désinfection des instruments thermostables et thermolabiles, des instruments dentaires ainsi que des endoscopes souples en bain de trempage ou à ultrasons, avant le traitement en machine
- Egalement adapté pour le trempage des instruments chirurgicaux et instruments dentaires pendant de longues périodes (par ex. pendant la nuit ou pendant le week-end).
- Bactéricide, levuricide, tuberculocide et partiellement virucide.
- Compatible avec les matériels, comme l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, les métaux non ferreux (cuivre et laiton), les silicones et les plastiques.

Propriétés:

- Très bonne efficacité détergente, ne fixe pas les protéines
- Grande compatibilité matériels
- Sans aldéhydes, ni ammonium quaternaire

Utilisation et dosage:

- neodisher Septo PreClean peut être utilisé en bain de trempage ou en bain à ultrasons. Doser la solution, selon les recommandations ci-après et en fonction de l'efficacité souhaitée. Déposer les instruments ou les endoscopes dans la solution diluée et respecter les temps de contact préconisés.
-
- Pour préparer la solution d'utilisation de neodisher Septo PreClean ZP, il est recommandé d'utiliser de l'eau adoucie avec une dureté inférieure à 10°f. La dureté d'eau ne doit pas dépasser 20°f

	Efficacité microbiologique Conditions de saleté, 20 °C
Bactéricidie 1	
EN 13727	5 ml/l (0,5 %), 5 min
EN 14561	5 ml/l (0,5 %), 15 min 15 ml/l (1,5 %), 5 min
Levuricide	
EN 13624	5 ml/l (0,5 %), 5 min
EN 14562	10 ml/l (1,0 %), 5 min 2,5 ml/l (0,25 %), 15 min
Tuberculocidie 1	
EN 14348	10 ml/l (1,0 %), 15 min
Virus à enveloppe	
BVDV (DVV/RKI)	5 ml/l (0,5 %), 1 min
Virus de la vaccine (DVV/RKI)	15 ml/l (1,5 %), 10 min 10 ml/l (1,0 %), 30 min

Lors du trempage, l'instrumentation peut rester jusqu'à 72 heures dans la solution de neodisher Septo PreClean ZP.

La solution d'utilisation de neodisher Septo PreClean ZP reste stable pendant 7 jours. Nous recommandons cependant de changer la solution chaque jour, et encore plus fréquemment si le degré de saleté est élevé.

Renouveler la solution après chaque utilisation.

Rincer la solution du neodisher Septo PreClean ZP à l'eau (de préférence déminéralisée). Des résidus du neodisher Septo PreClean ZP présents sur l'instrumentation, qui seraient transférés dans le laveur-désinfecteur, n'engendrent ni formation de mousse, ni perte de pression des pompes.

Ne pas utiliser de produits à base d'aldéhydes avant ou après l'utilisation de neodisher Septo PreClean ZP.

1 Selon les normes européennes EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 et EN 14348

2 Selon les tests de validation de l'Institut Robert Koch (RKI) et de l'Association allemande de lutte contre les maladies virales(DVV)



neodisher® Septo PreClean ZP

Recommandations générales d'utilisation:

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons des solutions de dosage (n'hésitez pas à nous contacter).
- Il est recommandé de porter des gants pour manipuler les produits désinfectants.
- Le traitement du matériel doit être conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux
- Respecter les recommandations des fabricants d'instruments conformément aux exigences de la norme EN ISO 17664.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits

Expertises:

L'efficacité désinfectante a été testée selon les normes européennes EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 et EN 14348 ainsi que selon les méthodes de l'Institut Robert Koch (RKI). Les expertises sont disponibles sur demande.

Données techniques:

pH	8,9 - 8,7 (5 - 15 ml/l, en eau déminéralisée, 20°C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)
Poids spécifique	1,0 g/cm ³ (20 °C)

Composants:

Selon le règlement européen 648/2004 relatif aux détergents:


- < 5 % tensioactifs non ioniques,
- 5 - 15 % tensioactifs amphotères,
- Substance désinfectante dans 100 g:
8,0 g de Lauryl propylène diamine (sels).

Marquage CE: 0297

neodisher Septo PreClean ZP est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive 93/42/CEE, Annexe I.

Stockage:

Conserver une température entre 0 et 30°C. La couleur du produit dans le bidon fermé peut varier avec le temps. Cela n'a aucune influence sur ses propriétés techniques.

Valable 3 ans dans les conditions de stockage recommandées. Utilisable jusque: voir date indiquée sur l'étiquette, après le symbole .

Classement et étiquetage selon les critères de la directive européenne 1999/45/EG

Symbole de danger C - corrosif

Contient: Diamine de lauryl propylène et tensioactifs amphotères

Indications de risques

R 22 - Nocif en cas d'ingestion.

R 34 - Provoque des brûlures.

Consignes de sécurité:

S 26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
S 27/28 - Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, laver

abondamment avec de l'eau

S 36/37/39 - Porter des vêtements/gants/lunettes et masque de protection appropriés.

S 45 - En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'emballage ou cette fiche technique).

Les solutions d'utilisation de neodisher Septo PreClean ZP aux concentrations recommandées ne sont pas classées dangereuses selon les critères de la directive européenne 1999/45/EG. Néanmoins, il est recommandé de porter des gants lors de la manipulation de la solution diluée.

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant, voir fiche de données de sécurité.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur: www.drweigert.de - Rubrique "service".

Conditionnement	Contenu
Bidon	5 L
Flacon	10 x 1 L

FT 4068/3-3
07/2012

Indications de risques et consignes de sécurité

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.

With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.