

Protocole d'utilisation : aspirmatic®

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Solution concentrée pour le nettoyage quotidien et la désinfection des systèmes d'aspiration, crachoirs, flexibles et séparateurs d'amalgame

- Excellente matérieo-compatibilité
- Odeur très agréable
- Non moussant – non colorant
- Doseur universel

Testé avec succès par les principaux fabricants de machines (Kavo, Sirona...) et par de nombreux services techniques

Recommandations d'utilisation :

- Dilution à 2 % pendant 30 min
- A utiliser 1 à 2 fois par jour et après chaque intervention sanglante

Normalisation :

- Bactéricide NF EN 1040
- Fongicide NF EN 1275
- Virucide HBV, HCV -modèle BVDV-HIV

- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Verser d'abord l'eau dans l'Aspirmatic® System jusqu'au niveau 1960 ml



Etape 2

Visser le bouchon doseur sur la bouteille et verser 2 x 20 ml de concentré dans l'eau pour obtenir 2 l de solution à 2 %



Etape 3

Positionner les tuyaux d'aspiration sur les embouts adaptateurs de l'Aspirmatic® System



Etape 4

La solution est aspirée automatiquement
Il restera systématiquement 600 ml de solution dans l'Aspirmatic® System



Etape 5

Verser la solution restante dans le crachoir afin de nettoyer et désinfecter l'évacuation



Etape 6

Laissez agir la solution au moins 30 minutes.
Par exemple, à la pause déjeuner et pendant la nuit.



Nous recommandons les lingettes Mikrozid® pour nettoyer la surface du crachoir et des tuyaux

